
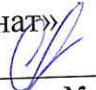


Согласовано
Председатель профкома ГБОУ СО
«Верхнесинячихинская школа-
интернат»
 С.А. Альшевский
Протокол № 8 от «14» 08 2020г.

Утверждено
Директор ГБОУ СО
«Верхнесинячихинская школа-
интернат»

 О.А. Бурухина
Приказ № 116-ОД от «09»
06 2020г.

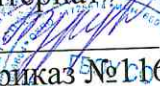

ИНСТРУКЦИЯ

ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ РЕЦИРКУЛЯТОРА РБ 2Х15

1. Рециркулятор РБ 2х15 крепится на стене помещения и применяется для обеззараживания воздуха помещений в присутствии и отсутствии людей. Предназначен для дезинфекции воздуха больниц, клиник, лечебно-профилактических, производственных и общественных учреждениях. Источником излучения рециркулятора являются бактерицидные ртутные лампы низкого давления типа TUV15 излучающие ультрафиолетовые лучи с длиной волны 253,7 нм, губительные для различных бактерий, вирусов и микроорганизмов, находящихся в воздухе помещений.
2. Для включения прибора подключить рециркулятор к сети и нажать клавишный переключатель.
3. Для выключения рециркулятора нажать клавишный переключатель при необходимости отсоединить от сети.
4. Раз в месяц протирайте рециркулятор от пыли.
5. Регулярно проветривайте помещение.
6. Для замены ламп (через 8000 часов работы) необходимо отключить прибор от сети, снять кожух, вывернув саморезы, заменить лампы, затем провести сборку в обратном порядке.

